



Gebrauchsanweisung


SMT baby®

SMT môm®




Alle 6 Nasenstege der Nasenstege-Schablone auf der Nase des Kindes positionieren. Den an die Morphologie des Kindes am besten angepassten Nasensteg auswählen.

Jeder Nasensteg ist an der Schablone anhand von 2 Befestigungspunkten befestigt. Ausgewählten Nasensteg von der Schablone lösen.

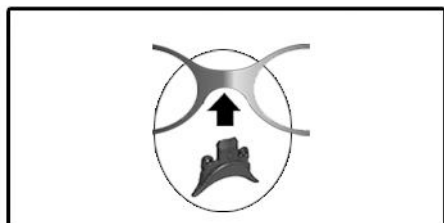


Nasensteg entweder per Hand oder mit Hilfe einer „2 mores“-Zange vorsichtig in die Brillenfassung einsetzen.

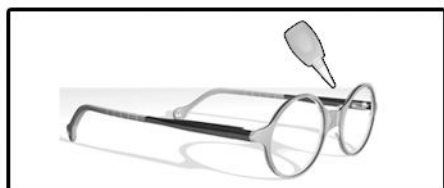

Sofern notwendig, etwas Klebstoff auf den Nasenausschnitt geben, sobald der Nasensteg positioniert ist.



Zum Abnehmen des Nasenstegs von der Brillenfassung die Zange verwenden, die sich in der Mitte der Nasenstege-Schablone befindet. Wenn Sie Klebstoff verwendet haben sollten, vor Einsatz der Zange erwärmen.

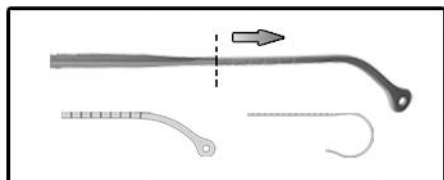

Kürzen der Bügel: Hülse abziehen, Hülse und Metallteil auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Zwischen der Hülse und dem Kunststoffteil des Bügels unbedingt einen Klebstoffpunkt setzen. Für einen optimalen Sitz der Hülse auf dem Schaft können Sie den Bügel auch erwärmen.



Für SMT Môm-Fassungen :

Im Bedarfsfall Kappe durch Einführen eines flachen Schraubendrehers zwischen Kappe und Fassung von unten und Drehen des Schraubendrehers lösen.

Kappe mit einer Flachzange vorsichtig erneut befestigen.