




## Modo de empleo

**SMT baby**<sup>®</sup>


**SMT môm**<sup>®</sup>



Colocar cada una de las 6 almohadillas de la regleta de almohadillas en la nariz del niño. Elegir la almohadilla mejor adaptada a la morfología del niño. Cada almohadilla está sujeta a la regleta por 2 puntos de fijación. Separar de la regleta la almohadilla seleccionada.

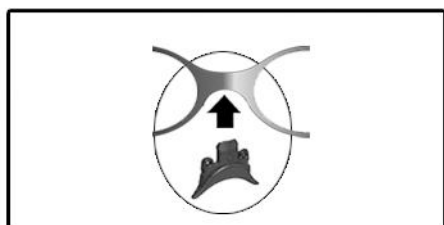


Introducir delicadamente la almohadilla en la montura, a mano o con ayuda de una pinza « 2 mordazas ».

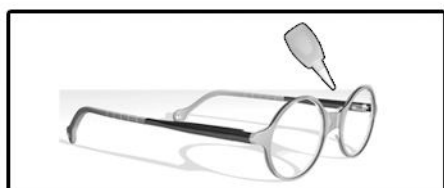

Si es necesario, poner un punto de cola en la parte superior de la muesca nasal, una vez posicionada la almohadilla



Para retirar la almohadilla de la montura, utilizar la pinza situada en el centro de la regleta de almohadillas. Si se ha puesto un punto de cola, calentar antes de utilizar la pinza.

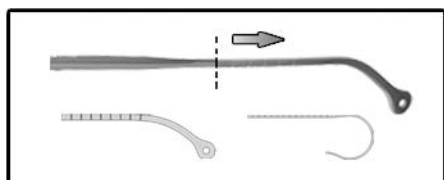

Para acortar las patillas: retirar el manguito. Cortar el manguito y la pieza metálica a la longitud deseada.  
Es imperativo poner un punto de cola entre el manguito y la parte de plástico de la patilla  
Es posible igualmente calentar la patilla, a fin de que el manguito se adhiera óptimamente a la patilla



**Para las monturas SMT Môm:**

Si es necesario, aflojar la tapa del puente introduciendo un destornillador plano entre la tapa y la montura, por la parte inferior, girando el destornillador. Para apretar de nuevo la tapa, utilizar cuidadosamente una pinza plana.