




## MODE D'EMPLOI


# SMT *sun*<sup>®</sup>



Choisir le nez adapté à la morphologie de l'enfant.  
Chaque nez est retenu à la réglette par 2 points d'attache.  
Détachez le nez choisi de la réglette.

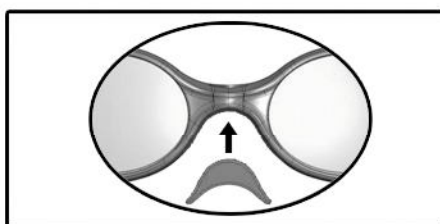

Insérer le nez délicatement dans la monture, à la main ou à l'aide d'une pince "2 mores".

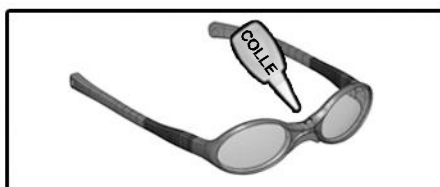

Si nécessaire, mettre un point de colle sur le dessus de l'encoche nasale, une fois le nez positionné.



Pour retirer le nez de la monture, utiliser la pince située au milieu de la réglette de nez.  
Si vous aviez mis un point de colle, chauffer avant d'utiliser la pince.



Pour raccourcir les branches : retirer le manchon, couper le manchon et la tige de la branche à la longueur désirée.  
Il est préférable de mettre un point de colle entre le manchon et la partie plastique de la branche.  
Vous pouvez également chauffer la branche pour que le manchon adhère de façon optimale à la tige.