




## Istruzioni per l'uso

**SMT baby**<sup>®</sup>


**SMT môm**<sup>®</sup>



Posizionare ciascuno dei 6 naselli del regolo da naso sul naso del bambino. Scegliere il nasello più adatto alla morfologia del bambino. Ogni nasello è trattenuto al regolo da due punti di attacco. Staccare dal regolo il nasello scelto

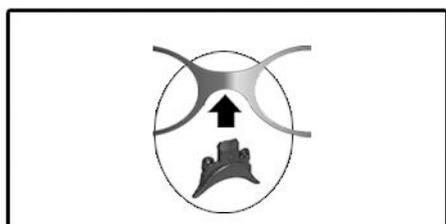


Inserire delicatamente il nasello nella montatura, a mano o con l'aiuto di una pinza «2 mores».

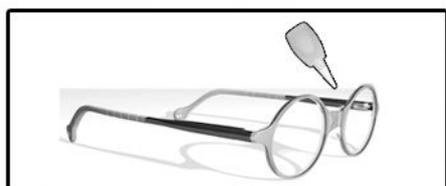

Se necessario, mettere un punto di colla sopra la tacca nasale, una volta posizionato il naso.



Per togliere il nasello dalla montatura, utilizzare la pinza situata al centro del regolo da naso. Se era stato messo un punto di colla, riscaldare prima di utilizzare la pinza.

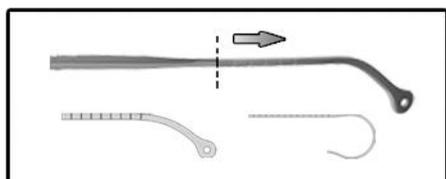

Per accorciare le stanghette: ritrarre il manicotto, tagliare il manicotto e il pezzo metallico alla lunghezza desiderata.

È indispensabile mettere un punto di colla tra il manicotto e la parte in plastica della stanghetta.

Si può anche riscaldare la stanghetta in modo che il manicotto aderisca in modo ottimale all'asta.



**Per le montature SMT Môm :**

In caso di necessità, allentare il cappuccio protettivo introducendo dal basso un cacciavite piatto tra il cappuccio e la montatura e ruotando il cacciavite. Per stringere nuovamente il cappuccio, utilizzare con cura una pinza piatta.