




ご使用方法

SMT baby®


SMT môm®



鼻幅の測定器の6つのノーズパッドをひとつずつ子供の鼻に当てます。
子供の鼻の形に最もよくフィットするノーズパッドを選択します。
ノーズパッドは2箇所測定器に留められています。
選択したノーズパッドを測定器から取り外します。

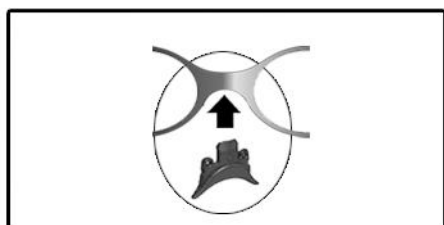

ノーズパッドを手あるいはピンセット«2 mores»を使って、
フレームに丁寧に差し込みます。

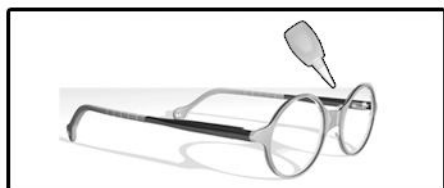


必要であれば、ノーズパッドを固定してから、
ブリッジの上に少量の糊を付けてください。



ノーズパッドをフレームから取り外すには、
鼻幅の測定器の中央にあるピンセットをご使用ください。

糊付けした場合は、ピンセットを使用する前に温めてください。

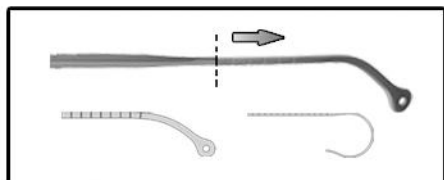

ツルを短くするには：モダンを外し、
モダンと金属部品を希望の長さにカットします。
モダンとツルのプラスチック部分の間には必ず少量の糊を付けてください。
モダンがツルに最高の状態で付くようにツルを温めることもできます。



SMT Mômフレーム：

必要であれば、カバーとフレームの間に下からマイナスドライ
バーを差し込み、回転させてカバーを緩めてください。

カバーを再び締めるには、平ペンチを使って注意深く行ってください。