



Способ использования :


SMT baby[®]

SMT môm[®]




Установите каждый из 6 носовых упоров регулируемой планки на нос ребенка.

Выберите носовой упор, наиболее подходящий к форме носа ребенка. Каждый носовой упор прикрепляется к регулируемой планке в двух точках. Отделите от планки выбранный носовой упор.

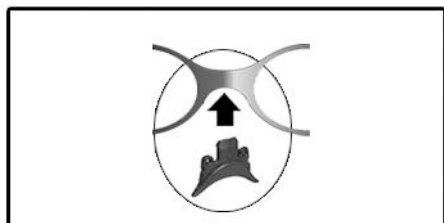


Аккуратно вставьте носовой упор в оправу рукой или с помощью пинцета «2 mores».

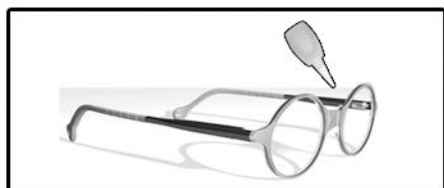

При необходимости после установки носового упора нанесите на его верхнюю часть капельку клея.



Чтобы отделить носовой упор от оправы, используйте зажим, расположенный посередине регулировочной планки носового упора. Если вы нанесли капельку клея, разогрейте пинцет перед использованием.

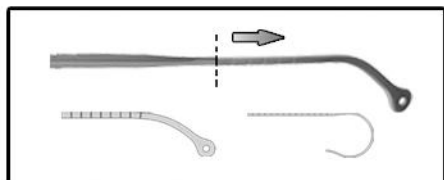

Чтобы укоротить дужки : снимите муфту, отрежьте муфту и металлическую деталь на нужную длину.

Обязательно нанесите капельку клея между муфтой и пластмассовой частью оправы.

Можно также разогреть дужку, чтобы муфта более надежно прилегал к стержню.



Для оправ SMT Môm :

При необходимости разогните кожух, вставив снизу плоскую отвертку между кожухом и оправой и повернув отвертку.

Чтобы снова зажать кожух, аккуратно воспользуйтесь плоским пинцетом.